

## BlanQuest Professional Whitening Treatment Kit

### Instrucciones de uso

El **BlanQuest Professional Whitening Treatment Kit** está diseñado para el tratamiento de dientes oscuros y decolorados causados por la ingesta oscura de alimentos y/o bebidas, pero también por decoloraciones causadas por factores farmacológicos y/o traumáticos como la fluorosis dental, la tetraciclina y las manchas adultas de minociclina.

El **BlanQuest Pro Kit** utiliza un gel de peróxido de hidrógeno de 35% solo o en combinación con un sistema de blanqueamiento dental. (Luz de blanqueamiento en clínica) En algunos casos se recomendará el refuerzo posterior con el **BlanQuest Home Whitening Kit** o el **LuxBrite Personal Teeth Whitening Accelerator**.

El **BlanQuest Pro Kit** está diseñado para su uso en clínica por un profesional dental capacitado. Se recomendará una consulta previa para asegurar que no existen problemas de salud oral subyacentes. Se establecerán expectativas reales sobre los resultados finales del blanqueamiento basados en un examen oral previo, explicar los resultados pueden variar entre 3 y 8 tonos en guía VITA Classical Shade Guide. La condición de los dientes, la edad, la anatomía, la dieta, la higiene, etc., determinarán los resultados finales que cada paciente podrá alcanzar, y deberá mantener una dieta blanca post-Blanqueamiento.

Los dientes con manchas amarillas y marrones obtenidas de bebidas oscuras, comidas y tabaco lograrán mayores resultados, mientras que los dientes de tetraciclina y manchas de fluorosis u otros medicamentos pueden experimentar resultados diferentes, ya que estos casos requieren otro tipo de tratamiento. Las coronas y otras restauraciones dentales no se blanquearán; Para mantener un color uniforme, las restauraciones de color de dientes pueden requerir reemplazo después del procedimiento de blanqueamiento.

### Contraindicaciones

No se recomienda para:

Mujeres embarazadas o lactantes.

Niños menores de 16 años.

Aquellos que actualmente son tratados por una enfermedad o trastorno grave (Inmune comprometida, Cáncer, SIDA).

Alérgico a los peróxidos o glicoles.

**Precauciones:**

Mantener fuera del alcance de los niños.

Almacenar en lugares frescos lejos de material combustible.

Llevar ropa de protección adecuada y gafas.

**Pre-Blanqueamiento**

**Paso 1:** Determine y registre el color de los dientes con Guía VITA.

**Paso 2:** Realizar un examen oral y consultar los resultados de blanqueamiento deseados para determinar el mejor plan de tratamiento.

**Paso 3:** Aplique Vitamina E o crema protectora para los labios en los labios.

**Paso 4:** Coloque gafas protectoras en el paciente.

**Paso 5:** Inserte el retractor-abreboca y cuidadosamente coloque el paño de protección facial alrededor del retractor.

**Paso 6:** Si es necesario para una mayor retracción de los labios, coloque los rollos de algodón en el centro de los vestíbulos superior e inferior. Aplique protección extra labial a las nuevas áreas expuestas.

**Procedimiento**

**Paso 7:** Seque los dientes y las encías.

**Paso 8:** Aísle los dientes para ser blanqueados usando la Protección Gingival GloboDent. Ningún tejido rosado debe ser visible entre los dientes y las encías. Para fraguar el protector gingival, se recomienda un curado de luz en movimiento circular. Si utiliza un acelerador de blanqueamiento, utilice cualquier recomendación adicional proporcionada por el proveedor de luz.

**Paso 9:** Aplicar el gel de blanqueamiento sobre los dientes con un espesor de entre 2,0 y 3,0 mm por diente. El gel debe ser viscoso y no debe moverse del diente.

**Paso 10:** El paciente debe estar acostado en posición reclinada (Angulo de 45°) y ser capaz de ingerir cómodamente mientras mantiene una ligera presión sobre el bloque de mordida del retractor-abreboca.

**Blanqueamiento**

**Paso 11:** Con el acelerador del blanqueamiento: Ajuste la luz para mantener la exposición correcta sobre los dientes. Completa 3 fases de 12 minutos cada una, después de cada fase, retire el gel de los dientes con el eyector, una vez aspirado el gel, tire aire sobre los dientes a la vez que aspire con el



eyector. Una vez que haya pasado el eyector, pase un rollo de algodón para arrastrar el posible peróxido que quede en la zona superior de los canales dentales y en la zona interdental.

Si es necesario, NO use agua entre las sesiones para enjuagar. Repetir la aplicación de gel dos veces mas para un total de 3 aplicaciones.

### **Post-Blanqueamiento**

**Paso 12:** Después de finalizar la ultima sesión, retire el gel blanqueador, aplique una capa de 1mm de espesor de Gel Remineralizante GloboDent. Se ha comprobado que el ingrediente del Gel GloboDent Remineralizante disminuye los problemas de sensibilidad y remineraliza el esmalte al mismo tiempo que disminuye los riesgos de sensibilidad dental. Deje el gel Remineralizante en los dientes durante 5 minutos.

**Paso 13:** Retire el gel Remineralizante, retire la protección gingival, el retractor de la mejilla, los rollos de algodón y las gafas de protección ocular.

**Paso 14:** Enjuague la boca del paciente con agua.

**Paso 15:** Muestre al paciente su nueva cortina de dientes blancos.

### **Puntos importantes a tener en cuenta**

Recomiende al paciente a no consumir alimentos o bebidas que causen manchas (café, té, pasta roja, etc.,) durante 2 días después del procedimiento de blanqueamiento.

Para obtener resultados adicionales o para el mantenimiento, el paciente puede hacer este procedimiento nuevamente o utilizar el GloboDent BlanQuest Home Whitening Kit.

Las mujeres embarazadas o lactantes y los niños menores de 16 años no son recomendados para someterse al procedimiento de blanqueamiento.

### **Almacenamiento**

Refrigerar el gel a 2° C - 10° C (36° F y 50° F). El almacenamiento encima de los 10° C (50° F) reducirá la vida útil.

#### **GloboDent Headquarters**

27131 Cinco Ranch Blvd. Ste 600-203

Katy, TX 77494

Ph: +1 (281) 712.8764

Email: [info@globodent.com](mailto:info@globodent.com)

[www.globodent.com](http://www.globodent.com)